



REGISTRO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



*Diritti di riproduzione, traduzione, adattamento anche parziale riservati in tutti i paesi.
I dati riportati nel presente documento non possono essere modificati senza la preventiva autorizzazione di Silaq S.r.l.*

Oggetto: Consegna DPI per rischio biologico virale - COVID 19

Io sottoscritto **Prof. DIGERONIMO SANTO**, in qualità di Dirigente Scolastico del **LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"**, CF 82002360871, con sede legale e operativa in **Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)**, COMUNICO che per affrontare l'emergenza CORONAVIRUS sul luogo di lavoro **METTO A DISPOSIZIONE** di tutti i lavoratori e ai componenti della commissione d'esame **MASCHERINE, GUANTI MONOUSO, GEL IGIENIZZANTE** che dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE** utilizzati durante le sessioni d'esame.

Come indossare e togliere la mascherina:

- ✓ prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- ✓ copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
- ✓ evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- ✓ quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere monouso
- ✓ toglila la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina
- ✓ gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



- 1** Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
- 2** Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
- 3** Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.
NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.
- 4** Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
- 5** La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.
 - Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione
 - Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
 - Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

Come indossare e togliere i guanti:

- ✓ Prima di indossare i guanti, bisogna – sempre – lavarsi le mani
- ✓ Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti)
- ✓ Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso
- ✓ Verificare che non siano difettosi o già bucati
- ✓ Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso
- ✓ Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile
- ✓ Per toglierli, procedi a sfilare il primo guanto aiutandoti con l'altra mano: "pizzica" con indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevalo e infilaci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tira leggermente, ruotando la mano del primo guanto. Dunque, fai lo stesso con l'altro guanto/altra mano in modo reciproco
- ✓ Tira verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi. Ciò significa che la superficie contaminata rimane all'interno
- ✓ Butta i guanti nel cestino dei rifiuti
- ✓ Lavati le mani
- ✓ Mentre indossi i guanti monouso non toccarti mai la bocca, il naso e gli occhi!

COME SFILARSI I GUANTI MONOUSO

È importante utilizzare i guanti monouso nel modo corretto per proteggersi da agenti chimici* e biologici*. Per una maggiore protezione, impara a sfilarti il guanto nel modo giusto.

NON DIMENTICARE

- Indossa i guanti con mani asciutte e pulite
- Controlla i guanti prima di usarli
- Evita gioielli e unghie lunghe
- Togli i guanti se sono danneggiati
- Non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso (utilizza un guanto riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)
- Butta via i guanti e lavati le mani



ASSOSISTEMA



ASSOSISTEMA
SAFETY

* A seconda del guanto utilizzato visionare la scheda tecnica per assicurarsi dell' idoneità del guanto

COSA FARE



LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Si raccomanda inoltre di:

- ✓ LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O GEL DISINFETTANTE (messo a disposizione dall'azienda)
- ✓ EVITARE IL CONATTO RAVVICINATO CON LE PERSONE MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
- ✓ COPRIRSI BOCCA E NASO CON UN FAZZOLETTO MONOUSO QUANDO SI STARNUTISCE O TOSSISCE
- ✓ EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI
- ✓ NON TOCCARSI CON LE MANI NASO, BOCCA E OCCHI
- ✓ NON RECARSI SUL LUOGO DI LAVORO IN PRESENZA DI FEBBRE 37,5° O ALTRI SINTOMI INFLUNZALI
- ✓ COMUNICARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO SE SI PRESENTA FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA COME LA TOSSE

L'Istituto assicura la pulizia e la disinfezione dei locali, degli ambienti e delle aree comuni.

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Le persone sotto elencate, dichiarano di ricevere i D.P.I. sopra elencati

COGNOME E NOME	DATA	FIRMA

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Le persone sotto elencate, dichiarano di ricevere i D.P.I. sopra elencati

COGNOME E NOME	DATA	FIRMA

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Le persone sotto elencate, dichiarano di ricevere i D.P.I. sopra elencati

COGNOME E NOME	DATA	FIRMA

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Le persone sotto elencate, dichiarano di ricevere i D.P.I. sopra elencati

COGNOME E NOME	DATA	FIRMA

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. LIBERTINI"

Via Luigi Einaudi, 5 - 95042 Grammichele (CT)

Le persone sotto elencate, dichiarano di ricevere i D.P.I. sopra elencati

COGNOME E NOME	DATA	FIRMA